

取扱説明書

歩行車 アクトモア パピー

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項
や使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がありましたら、当社までお問い合わせください。

株式会社フロンティア

1 ご使用上の注意

危険

【死亡または重傷を招くもの】

- エスカレーター・動く歩道・階段などでは使用しないでください。
段差のあるところでの使用は十分注意してください。転倒のおそれがあり危険です。
- 溝や踏切の線路での落輪、カスターの挟み込みには十分注意してください。

警告

【死亡または重傷を招く可能性があるもの】


- 取り扱いが理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。
取扱説明書に書かれた内容が理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合には、保護者、介護者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他、誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 本製品の耐荷重（P6 [10仕様] 参照）を守ってください。
- 凹凸や傾斜のある路面、すべりやすい場所で使用するときは十分注意してください。
急勾配の坂道では使用しないでください。
転倒のおそれがあり危険です。
- 急ブレーキをかけないでください。
バランスが崩れ不安定となり転倒するおそれがあります。
- 走行時は必ずグリップ（押し手）を握って走行してください。
グリップ（押し手）以外の部分を持って走行すると、転倒するおそれがあります。

⚠ 注意

【軽傷または中程度の傷害を招く可能性があるもの】

- 分解や改造をしないでください。
強度や耐久性が低下し、破損や転倒するおそれがあります。
- 火気に近づけないでください。
座面のカバーが燃えたり、熱くなった金属部でやけどをするおそれがあります。
- 杖立てに杖を装着したり、外したりする場合は、必ず駐車ブレーキをかけてください。
不安定になり、転倒のおそれがあります。
- 袖口やすその広い服装などで本製品を使用する場合は、注意してください。
衣服がキャスターに巻き込まれるおそれがあります。
- 本製品の開閉操作を行う際には、幼児を近づけないでください。
- 本製品を閉じるときは手を挟まないように注意してください。
- 風雨の強いとき、また傘を持ちながらの片手での使用はおやめください。
- 前・後ろのバッグともに4kg以上の重さの荷物を入れしないでください。
- バッグ以外の所に荷物をのせたり、つるしたりしないでください。

2 各部の名称

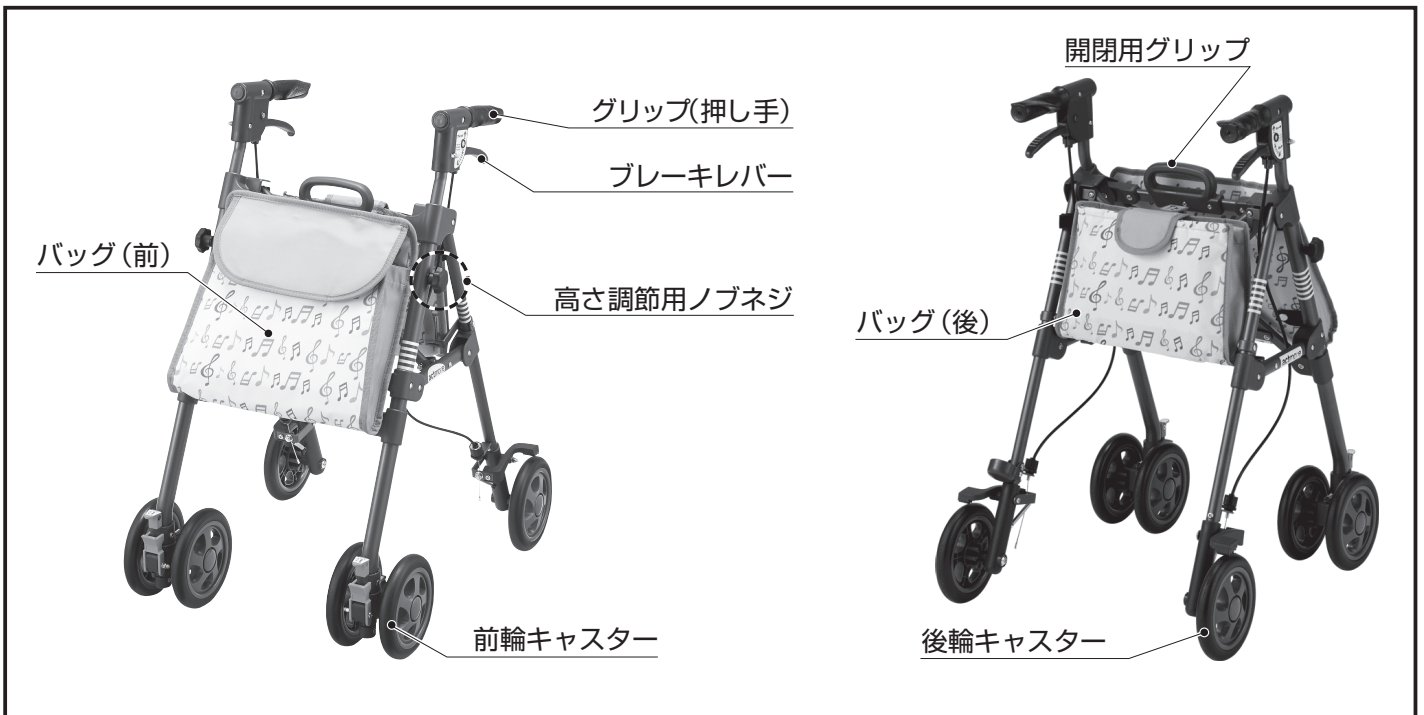

3 製品の特長

本製品は、歩行に不安のある方の歩行をサポートする歩行車です。

- コンパクトに折りたたむことができるため、バスや電車への持ち込みが簡単です。
- 前輪キャスターは360度回転、120度回転、固定(直進)の3タイプから選べます。
- グリップ(押し手)の高さは体に合わせて6段階の調整ができます。また、便利な杖立てや収納バッグ付きです。

4 適合調整

グリップ(押し手)の高さ調整のしかた

- ① 左右のグリップ(押し手)の下にある黒いノブネジをゆるめてボルトを抜きます。
- ② グリップ(押し手)を上下し、高さを調整してください。
- ③ 高さが決まったら、ボルトを本体フレームの穴に合わせて奥まではめ込み、ノブネジを回してしっかりと締めてください。

△注意

高さ調整を行った際は、左右同じ高さであることを確認してください。
また、はめ込みが不十分だと、使用中にグリップ(押し手)がぐらつき、転倒するおそれがあります。

ポイント

まっすぐ立って腕を下げたときの手首の位置、あるいは大転子のあたりを、グリップ(押し手)の高さの基準にします。



ブレーキ調整のしかた



- ① ブレーキがかかっていないことを確認してください。
- ② 後輪キャスト上方にあるブレーキワイヤーを留めている六角ナットをゆるめます(図1参照)。
- ③ 調整ネジ上部に記載の矢印の通りに回してブレーキを調整してください(図2参照)。
時計回り(ゆるむ方向)に回すと、利きがゆるくなります。
逆に、反時計回り(締まる方向)に回すと、利きがよくなります。
- ④ 調整後、六角ナットを確実に締めます。

△危険

ブレーキ調整部は左右2ヶ所あります。左右のブレーキが同じように利くように調整してください。左右のブレーキの利き方が違うとバランスを崩すおそれがあり危険です。

ポイント

ブレーキ金具とキャストのすき間が5mmくらいになるように調整します。

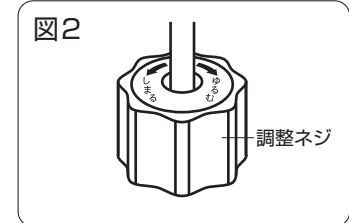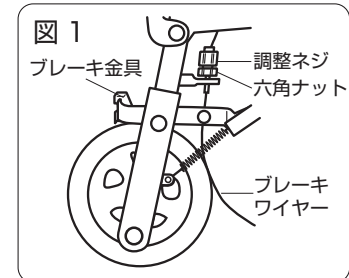

5 ご使用前の準備と点検

ご使用前に以下の点を確認してください。

- ブレーキレバーを握り、ブレーキが利くこと。
- 駐車ブレーキがキャストを固定すること。
調整ネジを締めても利きが悪いときは、当社にご連絡ください。
- キャスターのネジがゆるんでいないこと。

6 ご使用方法


1. 開きかた

- ① 開閉用グリップを下に押し下げます。開きにくいときは、本体を少し左右に開いてから作業を行ってください。
- ② 本体がしっかり開いたことを確認し、赤い開閉用レバーを下に押し下げロックをしてください。

△ 注意

操作を行うとき、パイプの間に手や足などを挟むおそれがあります。

開閉用
グリップ

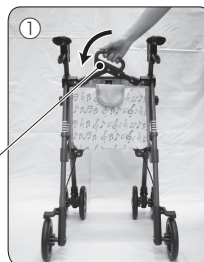

2. 走行時のブレーキのかけかた

自転車のブレーキを使う要領で、グリップ (押し手) とブレーキレバーを同時に握ると、ブレーキがかかります。ブレーキレバーから手を離すとブレーキは解除されます。

△ 警告 ブレーキをかけるときは、ゆっくりとレバーを握ってください。



3. 駐車時のブレーキのかけかた

- 左右両方のブレーキレバーを下に押し下げます。
ブレーキ金具がキャストを確実に押さえているか確認してください。
- 解除するには、ブレーキレバーを押し上げます。
または、グリップ (押し手) とブレーキレバーを同時に握りしめても解除できます。

△ 危険 荷物を出し入れするときや開閉操作を行う際は、必ず駐車ブレーキをかけてください。





4. 折りたたみかた

- ① 本体中央にある開閉用レバーを上引き上げロックを解除します。
- ② 本体中央にある開閉用グリップを上引き上げます。

△ 注意

- 操作を行うとき、パイプの間に手や足などを挟むおそれがあります。
- 折りたたんだ状態は倒れやすくなるため、壊れやすい物のそばに置かないでください。

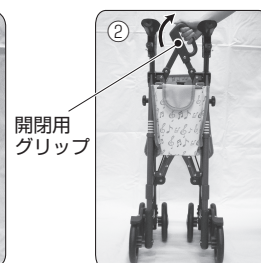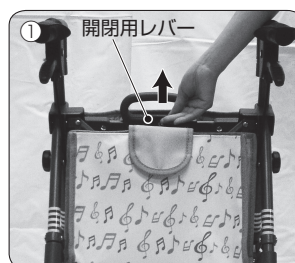

5. 前輪キャストの切り替えかた

前輪キャストの回転角度を3段階で調整できます。
左右の前輪キャストを同じ回転角度に設定してください。

固定 (直進のみ)

下
上
キャスト切替えレバーを下に下げ、キャスト回転止めレバーを上上げます。


360度回転

上
下
キャスト切替えレバーを上上げ、キャスト回転止めレバーを下に下げると、前輪キャストが360度回転します。

120度回転

下
下
キャスト切替えレバーとキャスト回転止めレバーを下に下げると、前輪キャストが左右60度ずつ回転します。

△ 注意 360度回転から、120度回転に切り替えるときは、キャスト切替え軸が穴に確実に入っているか確認してください。

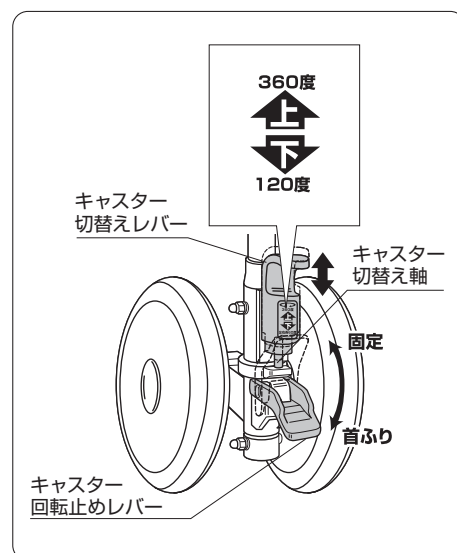

7 お手入れの方法

- 使用前には必ず下記の事項を点検・整備し、常に安全な状態でお使いください。
- ① キャスター、ブレーキなどのゆるみを点検し、ゆるんでいるときは増し締めをしてください。
- ② ブレーキの利き具合が悪いときは、後輪キャスター上部のブレーキワイヤーを調整してください。それでも直らないときには、当社にご連絡ください。
- 水を含ませた布でふき、汚れを取り除いてください。
- キャスターや車体がきしむ場合、当社にご連絡ください。

8 保管場所

次のような場所では、保管しないでください。故障の原因となります。

- 雨が当たる場所
- 炎天下、直射日光が当たる場所
- 湿気の多い場所
- 高温になる場所

9 故障かな？と思ったら

故障でない場合もありますので、修理を依頼される前にもう一度以下の項目をチェックしてください。

症状	考えられる原因	処置
グリップ(押し手)がグラグラと動く	グリップ(押し手)の高さ調整部が確実に固定されていない	グリップ(押し手)高さ調整部分のボルトとノブネジが、確実にハマっているか確認してください
走行時のブレーキが利かない	キャスターの磨耗	キャスターの交換が必要です。当社にご連絡ください
	ブレーキがゆるく調整されている	ブレーキ調整(P3)を行ってください
駐車時のブレーキが利かない	ブレーキ金具のねじれ、曲がり	当社にご連絡ください
	バネの劣化	バネの交換が必要です。当社にご連絡ください
	キャスターの破損	キャスターの交換が必要です。当社にご連絡ください
	連結部分のさび	当社にご連絡ください
キャスターが重い	キャスターに髪の毛、ビニールなどが巻きついている	キャスターを手で回転させて、取り除いてください
	駐車ブレーキがかかっている	駐車ブレーキを解除してください
	バネの劣化	バネの交換が必要です。当社にご連絡ください

※チェックを行っても正常に使用できない場合、または破損や異常を発見した場合はすぐに使用を中止して、当社にご連絡ください

10仕様

製品名	アクトモア パピー		
種類	グリーン	ブラウン	レザー調
適応身長めやす	旧140~160cm/145~165cm、新仕様150~170cm		
本体外形寸法 (全幅×奥行×全高)	旧46.5×57.5×71~80cm/46.5×57.5×74~83cm、 新仕様46.5×57.5×78~87cm		
折りたたみ時奥行	約33.5cm		
グリップ(押し手)高	旧71~80cm/74~83cm、新仕様78~87cm(6段階調節)		
重量	約4.6kg		約4.7kg
耐荷重(積載物含む)	75kg		
バッグ積載量	4kg		
キャスター径	6インチ		
キャスター仕様	前輪: 360度回転・120度・固定(直進) 後輪: 固定(直進)		
材質	フレーム: アルミ バッグ: ポリエステル		

■製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社フロンティア

フクシのこトハ

フリー
コール **0120-294-518**

千葉本社 福祉本部 〒261-0002
千葉県千葉市美浜区新港 42-4
TEL.043-301-8338



●アフターサービスのお問い合わせ

取扱店