

# 取扱説明書

## アクトモア ラテラルアームサポート

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。  
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項  
や使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がありましたら、当社までお問い合わせください。

株式会社フロンティア

### 1.ご使用上の注意



#### 警告

【死亡または重傷を招く可能性のあるもの】

- 取り扱いが理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。  
取扱説明書に書かれた内容が理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合には、保護者、介助者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 本製品を支えにして車いすから立ち上がらないでください。  
本製品が外れたり、不安定になり転倒するおそれがあります。
- 本製品を持って車いすを持ち上げたり、移動しないでください。



#### 注意

【軽傷または中程度の傷害を招く可能性があるもの】

- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 体に無理のかかる体勢で使用しないでください。
- 必ず適応したサイズのアームサポートパッドに取り付けてください。
- 本製品を火気に近づけないでください。
- 直射日光の当たるところに保管・放置しないでください。

### 2.製品の特長

- クッション性の高い、幅広のアームサポートです。
- 側面のクッションは骨盤を安定させるためのサポートに使用できます。
- 車いすの幅が合わない方、まひで体が横に崩れやすい方におすすめです。
- 左右のアームサポートに取り付けができ、体の状態に合わせて使用できます。
- 面ファスナーで簡単に着脱ができます。

### 3.使用方法

- ① 本製品の側面を車いすの内側に向け、アームサポートにはめ込むように取り付けてください。  
※クッションの厚みで車いすの内幅が5～6 cm狭くなります
- ② 本製品の位置を調整し、面ファスナー2ヶ所を留めて上面のクッションが水平になるように固定してください。


①側面を内側に向ける



アームサポートにはめこむように取り付ける



②

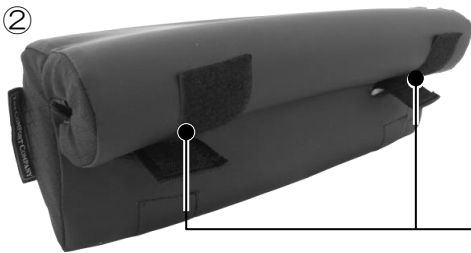

面ファスナー

### 4.日常のお手入れ

本製品は洗濯することはできません。  
汚れた場合は水を含ませた布で拭き、汚れを取り除いてください。

### 5.仕様

製品名	アクトモア ラテラルアームサポート
本体外形寸法	幅13×長さ40×高さ14 cm
材質	中材：ウレタンフォーム カバー：ポリエステルニット、ポリウレタンフィルム

■製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

**株式会社フロンティア**  
フクシのこトハ  
フリー  
コール **0120-294-518**

千葉本社 福祉本部 〒261-0002  
千葉県千葉市美浜区新港42-4  
TEL：043-301-8338

● アフターサービスのお問い合わせ

取扱店