

# 取扱説明書

## アクトモアステッキ レーザーガイド

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。  
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項や  
使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がありましたら、当社までお問い合わせください。

### 株式会社フロンティア

## 1.ご使用上の注意



### 警告

【死亡または重傷を招く可能性があるもの】

- 取り扱いが理解できないと思われる方が使用する場合は、十分に注意してください。  
取扱説明書に書かれた内容を理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合には、保護者、介護者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 杖なしでは歩行が困難な方（歩行に手すりや介助者を必要とする方を含む）や、リハビリ中などで体重の一部を支えないと歩行ができない方（医師の指示による場合を除く）は使用しないでください。  
この杖は、杖なしで自立歩行できる方がより安定して歩行できるように補助的に使用するものです。
- 傾斜や表面がすべりやすい場所などで使用する場合は、十分に注意してください。  
転倒のおそれがあります。
- 道路の側溝の溝や凹みがある場所などで使用する場合は、十分に注意してください。  
杖先が挟み込まれ、破損や転倒するおそれがあります。
- エスカレーターや動く歩道、階段などで使用する場合は、十分に注意してください。  
バランスを崩し転倒するおそれがあります。
- 本製品に異常がみられる場合は、当社へ連絡してください。



### 注意

【軽傷または中程度の傷害を招くもの】

- 使用前には、必ず各部の点検をしてください。  
（「4. 保守・点検について」参照）
- レーザーの光を人に直接向けないでください。
- 用途以外（登山用、護身用など）の使用はしないでください。
- 体に合った高さに調整して使用してください。  
高さを調整する際は、指を挟まないように注意してください。
- 本製品を火気に近づけないでください。  
熱くなった金属部でやけどをするおそれがあります。
- 分解・改造をしないでください。

## 2.製品の特長

- 杖をついたときだけ踏み出し位置のめやすになるレーザー光が照射します。
- 最初の一歩をサポートし、歩行のリズムが崩れやすい方におすすめです。



足元を照らす  
レーザー光

# 3. 使いかた

## 1. 長さのめやす

軽くひじを曲げた状態で使用できる長さが、一般的に力が入りやすいとされています。

① 杖のグリップを持ち、杖の先を足元の前約20cmに置き、軽くひじが曲がる角度（約140～150度）にした状態が長さのめやすとなります。

② 自然な姿勢で、杖を持つ側の肩が上がっていないか確認してください。

※あくまでも一般的なめやすです。実際に杖を使用する方の状態によって判断してください



## 2. 長さの調整のしかた

杖の長さは74～89cmの調整ができます。


① 締め込み金具をゆるめます。

② プッシュボタンを押しながら穴の位置を変更して高さを合わせます。

③ 高さが決まったら、締め込み金具を締めて固定します。

### ⚠注意

- 上3つの穴は使用できません。
- プッシュボタンが確実に穴から出ている、固定されていることを確認してください。

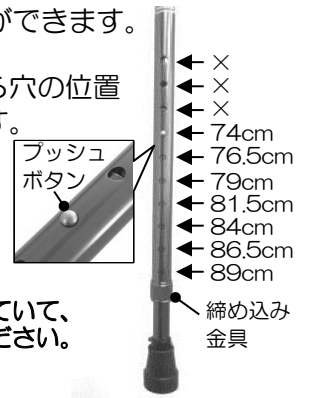

## 3. レーザー光の照射のしかた

① 赤ボタンをカチッと音がするまで押して、電源をオンにします。

② 杖先を床に押し付けて、緑色のレーザー光が床に映し出されていることを確認します。

※レーザー光が照射しない場合は、再度赤ボタンを押してください

③ 使用後は、赤ボタンをカチッと音がするまで押して、レーザー光の電源をオフにしてください。



## 4. 電池の交換のしかた

① 締め込み金具をゆるめ、プッシュボタンを押しながら杖先ゴム付近を握り、電池が見えるまで慎重に引いてください。

② 単三電池（2本）を交換し、杖を元に戻します。

### ⚠注意

- 強く引かないでください。強く引くと断線のおそれがあります。



# 4. 保守・点検

使用前・使用後には必ず下記の事項を点検・整備し、常に安全な状態で使用してください。

- パイプに傷や亀裂が入っていないか、曲がっていないか確認してください。
- 杖先ゴムが磨耗したり劣化していないか、またはビスにゆるみがないか確認してください。
- グリップ部や締め込み金具にゆるみがないか確認してください。
- プッシュボタンが確実に穴から出ている、固定されていることを確認してください。
- レーザー光の赤ボタンを押して、光が照射するか確認してください。
- 汚れたときは、水を含ませた布を固く絞り、表面の汚れをふき取ってください。

# 5. 仕様

製品名	アクトモア ステッキ レーザーガイド
サイズ	全長／74～89cm（2.5cm刻み、7段階調節）
重量	約520g
使用者最大体重	113kg
電源	単三電池2本
材質	本体／アルミニウム、グリップ／ポリ塩化ビニル、杖先／ゴム

■製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

## 株式会社フロンティア

フリーコール 0120-294-518

千葉本社 福祉本部 〒261-0002  
千葉県千葉市美浜区新港42-4  
TEL：043-301-8338

●アフターサービスのお問い合わせ

取扱店