

取扱説明書

アクトモア 4点杖

黒・紺・えんじ / ブラック・ネイビー・ワイン

アクトモア テトラ・ケイン

Sサイズ / Mサイズ

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項
や使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がありましたら、当社までお問い合わせください。

株式会社フロンティア

1 ご使用上の注意



警告

【死亡または重傷を招く可能性があるもの】

- 取り扱いが理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。
取扱説明書に書かれた内容が理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合には、保護者、介護者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 必ずベース部4点を接地させて使用してください。
バランスを崩し、転倒するおそれがあります。
階段・段差などでの使用は、特に注意してください。
- ベース部がすき間などに挟み込まれ、「固定」された状態で杖を動かさないでください。
破損し、転倒するおそれがあります。
- すべりやすい場所での使用は、特に注意してください。
- 本製品に異常がみられる場合は、当社へご連絡ください。



注意

【軽傷または中程度の傷害を招く可能性があるもの】

- 高さを調整する際は、指を挟まないように注意してください。
- 高さを調整した後は、必ず締め込み金具をしっかりと締めてください。
- 分解や改造をしないでください。
強度や耐久性が低下し、破損や転倒するおそれがあります。
- 火気に近づけないでください。
熱くなった金属部でやけどをするおそれがあります。
- 次のような場所・状況でのご使用は危険です。使用を避けるか、介助者に同行してもらってください。
・凸凹の激しい道 ・夜間、雨や雪、風の強い日 ・凍結路 ・深い砂利道や砂道
- 屋外や湿気の多いところや雨風の当たるところに本製品を放置しないでください。劣化の原因になります。

2 適合調整

1. 高さ調整のしかた


- ① 締め込み金具をゆるめます。
- ② ボタンロックピンを押しながら穴の位置を変更し、高さを調整します。
- ③ 調整が完了したら、締め込み金具をしっかりと締めます。

2. 右手用、左手用の調整のしかた

- ① 締め込み金具をゆるめます。
- ② ボタンロックピンを押しながらグリップを握り180度回転させます。
- ③ ベース部の広さが、狭いほうが体側になるように調整します。
- ④ 調整が完了したら、締め込み金具をしっかりと締めます。

ポイント

まっすぐ立って腕を下げたときの手首の位置、あるいは大転子(だいてんし)のあたりを、グリップの高さの基準にします。実際に杖を使用してみて高さを決めるとよいでしょう。

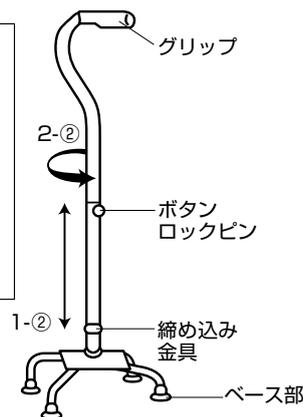

3 保守・点検

使用前・使用後には必ず下記の事項を点検・整備し、常に安全な状態で使用してください。

- 杖先ゴムの摩耗、パイプの変形など、本製品に異常が現れた場合は使用を中止し、当社へご連絡ください。
- 直射日光を避けて保管してください。ストーブのそばや車内などでは、杖の加熱に注意してください。やけどや火災の原因となります。

4 仕様

| 製品名 | アクトモア 4点杖 | | アクトモア テトラ・ケイン | |
|---------|-------------|---------------|---------------|---------|
| | 黒・紺・えんじ | ブラック・ネイビー・ワイン | Sサイズ | Mサイズ |
| 高さ | 64~86cm | | 60~75cm | 70~85cm |
| | 12段階調節2cm刻み | | 16段階調節1cm刻み | |
| ベース部サイズ | 16.5×22.5cm | 15×21.5cm | 16×22cm | |
| 重量 | 約645g | 約565g | 約440g | 約460g |
| 材質 | 本体 | アルミ | | マグネシウム |
| | グリップ | 樹脂 | | 樹脂 |
| 使用者最大体重 | 75kg | | 75kg | |

■製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社フロンティア

フクシのクトハ

フリーコール **0120-294-518**

福祉本部 〒261-0002
千葉県千葉市美浜区新港 42-4
TEL.043-301-8338



●アフターサービスのお問い合わせ

取扱店