

# 取扱説明書

## エンブレイス クッション

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。  
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項  
や使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がありましたら、当社までお問い合わせください。

株式会社フロンティア

### 1 ご使用上の注意



#### 警告

【死亡または重傷を招く可能性があるもの】

- 取り扱いが理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。  
取扱説明書に書かれた内容が理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合には、保護者、介護者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 本製品は車いす用のクッションです。安全にお使いいただくために、用途以外の使用はしないでください。
- 包装用ポリ袋は、製品を取り出した後、穴をあけて廃棄してください。  
ポリ袋を誤ってかぶったりすると、窒息する危険があります。
- 定期的に圧迫を開放してください。  
本製品は効果的に座圧を分散しますが、長時間同一姿勢の座位を続けると、床ずれの原因となります。
- 本製品を使用中の喫煙は、おやめください。  
火種の落下などによりやけどや火災の原因となります。
- 使用中に体に異常を感じたり、不安を感じた場合は、ただちに使用をやめ、当社にご連絡ください。  
症状悪化や事故のおそれがあります。




#### 注意

【軽傷または中程度の傷害を招く可能性があるもの】

- 常に乾燥した清潔な状態で使用してください。  
専用カバー洗濯後など、十分乾燥していない状態で使用すると、カビの発生や皮膚トラブルの原因となります。
- 低温の環境下（10℃以下）では、ウレタンフォームが硬くなることがあります。  
室温になじませてから使用してください。
- 本製品を正しい向きで車いすのシート（座面）に設置してください。  
誤った向きに本製品を設置すると、効果がのぞめなかったり、体が左右に傾いたり、症状を悪化させるおそれがあります。
- 直射日光の当たる場所や常温範囲外での使用は避けてください。  
ウレタンが劣化するおそれがあります。
- 本製品の上に物を置かないでください。  
圧縮した状態が続くと変形やへたりの原因となります。

## 2 製品の特徴

- 骨盤から大腿骨まで立体的にサポートできるので安定した姿勢を保ちやすく、座り心地も優れたクッションです。
  - ① 座骨結節部にかかる圧を大腿部に再分配させて骨盤を安定
  - ② 尾骨にかかる圧をスリット形状で軽減
  - ③ 下肢の内転を防ぎ、足をまっすぐ下ろせるようサポート
  - ④ 下肢の外転を防ぎ、姿勢を安定
- カバーは2層の伸縮する素材のグライドウェアにより、座骨結節部の摩擦とすれを軽減します。
- 車いすの座幅・座奥行きに合わせて9サイズから選べます。

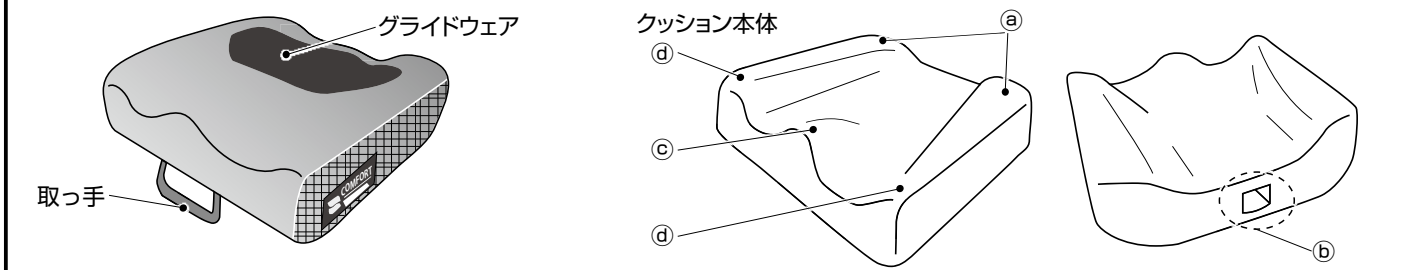

## 3 ご使用方法

専用カバー外側の取っ手のある側が車いすの前側にくるように、車いすのシート（座面）に設置してください。

**△注意** 正しい向きで車いすのシート（座面）に設置してください。

## 4 お手入れの方法

専用カバーのファスナーを空けてクッション本体を取り外します。

- 専用カバー……洗濯できます。水温66度以下であれば、洗濯機の使用が可能です。（漂白剤（酸素系）の使用可）低温であればタンブラー乾燥は可能です。洗濯後は吊り干しをしてください。

**△注意** 蒸気洗浄やアイロンなどは使用しないでください。

- クッション本体……洗濯できません。濡れてしまった場合は、風通しの良いところで陰干しをしてください。

※ ご使用によりウレタンフォームが変色することがありますが、品質特性に変わりはありません  
 ※ 製品を取り出した際、においが気になる場合には、風通しの良いところで陰干しをしてください

## 5 仕様

製品名	エンブレイス クッション		
幅	①37.5 ②40 ③42.5cm	①37.5 ②40 ③42.5cm	①37.5 ②40 ③42.5cm
奥行	37.5cm	40cm	42.5cm
厚み	10cm（前端大腿部：約6.35cm／後方中央部：約5.7cm）		
重量	約1.3kg		
素材	本体：ウレタンフォーム、樺の木 専用カバー：ポリウレタン、ナイロン（裏面：すべり止め加工）		

■製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

## 株式会社フロンティア

フリーコール **0120-294-518**

福祉本部 〒261-0002  
 千葉県千葉市美浜区新港42-4  
 TEL.043-301-8338



### ●アフターサービスのお問い合わせ

取扱店