

# 取扱説明書

## アジャスタークッション アジャスター ブレスクッション

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。  
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項  
や使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせください。

### 1 ご使用上の注意



#### 警告

【死亡または重傷を招く可能性があるもの】

- 取り扱いが理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。  
取扱説明書に書かれた内容が理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合には、保護者、介護者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 本製品は車いす用のクッションです。安全にお使いいただくために、用途以外の使用はしないでください。
- 包装用ポリ袋は、製品を取り出した後、穴をあけて廃棄してください。  
ポリ袋を誤ってかぶったりすると、窒息する危険があります。
- 定期的に圧迫を開放してください。  
このクッションは効果的に座圧を分散しますが、長時間同一姿勢の座位を続けると、床ずれの原因となります。
- 本製品を使用中の喫煙は、おやめください。  
火種の落下などによりやけどや火災の原因となります。



#### 注意

【軽傷または中程度の傷害を招く可能性があるもの】

- 常に乾燥した清潔な状態でご使用ください。  
洗濯後など、十分乾燥していない状態ではカビの発生や皮膚のトラブルの原因となります。
- 本製品を正しい向きで車いすのシート（座面）に設置してください。  
誤った向きに本製品を設置すると、効果がのぞめなかったり、体が左右に傾いたり、症状を悪化させるおそれがあります。
- 本製品のそばで鋭利なもの（安全ピンなど）を使用する場合は十分注意してください。  
穴があき、空気漏れをおこすおそれがあります。
- 本製品は座面用としてのみ使用してください。

## 2 製品の特長

- クッション本体は5つのブロックに分かれ、各ブロックからエアセルの数量を調整することができます。
- 左右の骨盤の高さに差がある方や、足こぎをされる方、すべり座りの方にも対応します。

## 3 ご使用方法

- ① カバーのファスナーを開き、クッション本体を取り出します。
- ② クッション本体のファスナーを開き、身体状況に合わせて各ブロックの中からエアセルを抜き差ししてクッションの厚みを調整します。
- ③ エアセルの調整が終わったらカバーを戻します。アジャスタークッションは、クッション本体の「BACK」と書かれたタグの反対側にカバーの取っ手がくるように入れます(写真A)。アジャスターブレスクッションは、クッション本体についているストラップを、カバーの「うしろ」と書かれたタグにある穴に通してファスナーを閉じます(写真B)。
- ④ 車いすのシート(座面)には、アジャスタークッションは取っ手が前にくるように置いてください。アジャスターブレスクッションはカバーの「うしろ」と書かれたタグが後ろ側にくるように置いてください。

**△注意** エアセルの調整を行った後は、必ず底づきをしていないことを確認してください。



## 4 お手入れの方法

カバー…洗濯できます(アジャスタークッション40℃以下、アジャスターブレスクッション60℃以下)。裏返して洗ってください。アジャスターブレスクッションは乾燥機(60℃以下)の使用が可能です。

**△注意** アイロン、漂白剤などは使用しないでください。

クッション本体…アジャスターブレスクッションはエアセルを入れたまま洗濯できます(60℃以下)。

アジャスタークッションは洗濯できません。汚れた際は中性洗剤を含ませた布でふいてください。

**△注意** 乾燥機、漂白剤などは使用しないでください。

## 5 仕様

製品名		アジャスタークッション		アジャスター ブレスクッション	
種類	□タイプ (厚さ約6cm)	ハイタイプ (厚さ約10cm)		□タイプ (厚さ約6cm)	ハイタイプ (厚さ約10cm)
	本体外形寸法				
幅38cm×奥行40cm					
幅40cm×奥行40cm					
重量		約740g		約560g	
材質	本体	エアセル			
	カバー	ポリウレタン(防水仕様)		通気タイプ: ポリエステル、 防水タイプ(オプション): ポリウレタン・ポリエステル	

■製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

## 株式会社フロンティア

フクシのこトハ

フリー  
コール **0120-294-518**

千葉本社 福祉本部 〒261-0002  
千葉県千葉市美浜区新港42-4  
TEL. 043-301-8338



### ●アフターサービスのお問い合わせ

取扱店