

# 取扱説明書

## Wellstyle 和ベッド

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。  
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項  
や使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせください。

### 1.ご使用上の注意



#### 警告

【死亡または重傷を招く可能性のあるもの】

- 取り扱いが理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。  
取扱説明書に書かれた内容が理解できないと思われる方（用事や認知症の方など）が使用する場合には、保護者、介護者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 本製品の乗り移りをする際には、十分注意してください。  
本製品は床からの高さが非常に低くなっていますが、転落時の安全を保障するものではありません。転落が予想される場合は衝撃を和らげる工夫を行ってください。




#### 注意

【軽傷または中程度の障害を招く可能性があるもの】

- 本製品に火気を近づけないでください。  
カバーには難燃加工が施されていますが、不燃ではありません。また、ウレタンに火が燃え移ると、火災ややけどの原因となります。
- 常に乾燥した清潔な状態で使用してください。  
ベッドやマットレスに湿気がたまると、カビや細菌繁殖の原因となり、不衛生な状態となります。特に通気性のあるマットレスを使用されているとき、湿度の高いとき、室温変化が大きいときには、結露して水がたまりやすくなります。1～数日に1回はベッドからマットレスを出して干すなどし、十分に乾燥させた状態でお使いください。また、ベッド本体も時々床から浮かせて、床面との間も乾燥させてください。
- 本製品の上で立ち上がったたり、直接のったりしないでください。  
本体の破損や、ケガの原因となります。
- カバーを持って移動させないでください。  
本製品を移動させる際は、分解するか2名以上で本体ウレタン部分を持ち上げ、移動させてください。カバーを持って移動させると、カバーやファスナーが破損するおそれがあります。
- カバーが切れた場合は交換してください。  
防水カバーが切れてウレタン部分に感染性の汚染物が入った場合、ベッドを原因とした感染の可能性がります。交換カバーについては、当社にお問い合わせください。
- 本製品を丸ごと洗わないでください。  
防水カバーを使用していますが、完全防水ではありません。縫い目などから液体がはいりますので、汚れはふき取ってください。
- カバーは洗濯可能です。ウレタン本体は洗えません。  
カバーを洗濯する際には、カバー本体の洗濯表示に従ってください。ただし、脱水機は水が抜けずに洗濯機の異常振動や破損を引き起こす可能性がありますので、使用をやめてください。

## 2.ご使用方法

### 設置方法

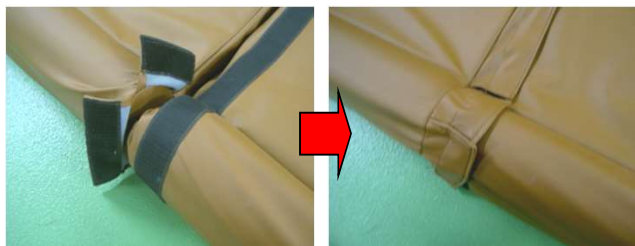

マジックテープがきちんと付いているか確認してください

※ 和ベッドは平坦な床に直接敷いてください

- 2組のベッド本体を本体付属のマジックテープで組み合わせてください。組み合わせ面はすき間ができないように注意してください。
- 頭側、脚側の向きは兼用のため特にございませぬ。安全に乗り降りできる場所に設置してください。
- 和ベッドは組み合わせて使用するマットレスが必要です。幅83cm、長さ191cm、厚み8cm以内のマットレスを組み合わせて使用してください。

## 3.お手入れの方法

### カバー

- 固く絞った布などでふき取ってください。
- 感染性の汚れに対しては、指定濃度に希釈した薬液 { 消毒用エタノール、グルコル酸クロルヘキシジン（ヒビデン）、塩化ベンザルコニウム（オスバン）、塩化ベンゼトニウム（ハイアミン）など } を使用して清拭してください。
- カバーを洗濯する際には、カバーの洗濯表示に従い水洗いかドライクリーニングをしてください。

### ウレタン素材

- 洗濯はできません。汚れてしまった場合は、固く絞った布などでたたくように清拭してください。
- 消毒が必要な場合は、指定濃度に希釈した消毒薬で湿らせた布で清拭した後、日陰でよく乾燥させてください。濡れてしまった場合も、風通しのよい場所で陰干ししてください。

## 4.仕様

製品名	Wellstyle 和ベッド	
本体外形寸法（全長×全幅×全高）	209×101×22cm	
重量	約7kg	
材質	中材	ウレタンフォーム
	カバー	ポリエステルニット
	カバー加工	特定用途制菌加工 難燃加工 防水仕様

■ 製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

**株式会社フロンティア**  
フクシのクトハ  
フリー  
コール 0120-294-518

千葉本社 福祉本部 〒261-0002  
千葉県千葉市美浜区新港42-4  
TEL : 043-301-8338

●アフターサービスのお問い合わせ

取扱店