

取扱説明書

Wellstyle キャップオープナー

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項や
使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がありましたら、当社までお問い合わせください。

株式会社フロンティア

1. ご使用上の注意


⚠ 注意

【軽度または中程度の傷害を招く可能性があるもの】

- 取り扱いが理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。
取扱説明書に書かれた内容が理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が
使用する場合には、保護者・介護者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、
本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 目的以外の用途に使用しないでください。
- 火のそばに置かないでください。
変色や変形の原因となります。
- 手や指を挟まないように注意してください。

2. 製品の特長

本製品一つで、さまざまなサイズのキャップを小さな力で
開けられます。

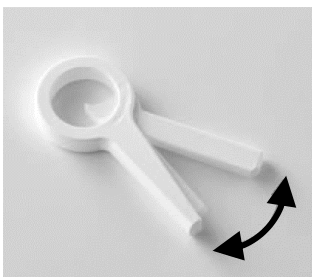


3.使いかた

直径2.2~4.2cmのキャップに対応します。

【開けるとき】

- ① ハンドルを広げて、キャップに被せます。
- ② ハンドルを握りキャップを挟んで固定し、反時計回りに回してキャップをゆるめます。

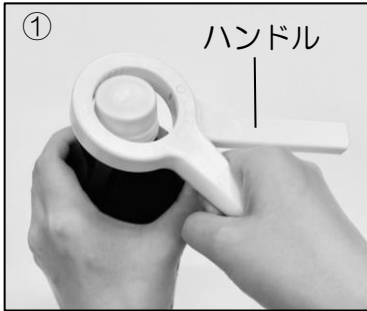

⚠注意

- 溝のないキャップの場合、すべってしまい使用できないおそれがあります。
- 手や指を挟まないように注意してください。

4.お手入れの方法

- 中性洗剤を使って、スポンジできれいに洗ってください。
- しっかりと水気を切って保管してください。

⚠注意

- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
- タワシや研磨剤を使用しないでください。

5.仕様

商品名	Wellstyle キャップオープナー
サイズ	幅6.1×長さ14×厚み1.5cm
重量	約44 g
キャップ対応サイズ	直径2.2~4.2cm
食洗機／乾燥機の使用	可（100度まで）
材質	POM樹脂

■製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社フロンティア

フリー
コール 0120-294-518

千葉本社 福祉本部 〒261-0002
千葉県千葉市美浜区新港42-4
TEL：043-301-8338

●アフターサービスのお問い合わせ

取扱店