

取扱説明書

Wellstyle スライドグローブ

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項
や使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がありましたら、当社までお問い合わせください。

株式会社フロンティア

1.ご使用上の注意



警告

【死亡または重傷を招く可能性のあるもの】

- 取り扱いが理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。
取扱説明書に書かれた内容が理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合には、保護者、介護者等が必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 用途以外の目的で使用しないでください。
- 火気・高温の近くで使用しないでください。
火災・変形の原因になります。



注意

【軽傷または中程度の傷害を招く可能性のあるもの】

- 使用後は床の上やベッドの上のなどに放置しないでください。
本製品はすべりがよい商品です。転倒・転落の原因となり、事故やケガのおそれがあります。
- 裏返したまま使用しないでください。
- 無理に引っ張ったり、鋭利なものを引っ掛けたりしないでください。
- 体質によっては使用時に、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすおそれがあるためご注意ください。
異常を感じたら使用しないでください。


2.製品の特長

- すべりやすい素材なので、荷重のかかっている体の部位に簡単に手を差し込むことができ、利用者・介助者共に負担なくスレを解消します。
- 汚れた場合でも、洗濯ができるため、いつでも清潔にご使用いただけます。



3.ご使用方法

- ① 本製品を介助者が手にはめます。
 - ② 荷重がかかっている部位に本製品を装着した手を差し込み、やさしく動かして不快感やズレなどを解消します。
- 使用例①：介護用ベッドの背上げ・背下げ機能を使用したときの不快感やズレを解消
 - 使用例②：ベッド上でポジショニングクッションを使用したときの不快感やズレを解消
 - 使用例③：ベッド上で寝位置を修正するときに引っ張らずやさしくすべらせて移動

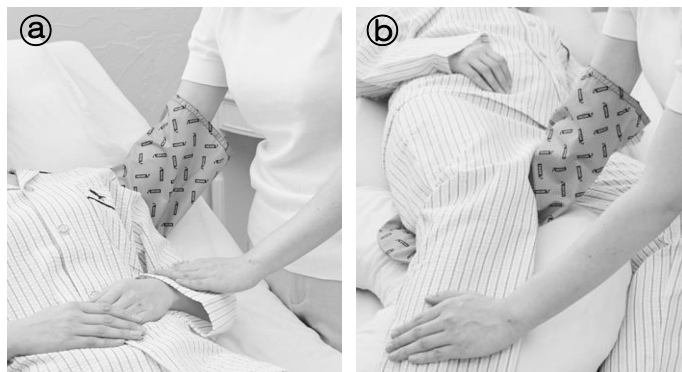

⚠️注意

- 手を差し込んだ状態で体を持ち上げたりしないでください。
- 痛み・かぶれ・かゆみ・などの異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 裏返した状態で使用しないでください。すべりが悪くなります。洗濯タグが内側にある状態で使用してください。

4.お手入れの方法

- 洗濯する場合は下記の洗濯表示に従い水洗いしてください。



- 水をきって、陰干しで乾燥させてください。
- 洗濯後は十分に乾かしてください。十分乾燥していない状態で使用すると、カビの発生や皮膚のトラブルの原因となります。

- ⚠️注意 鋭利なものと一緒に洗わないでください。

5.仕様

製品名	Wellstyle スライドグローブ (2枚組)
サイズ (幅×長さ)	19.5×50cm
材 質	ナイロン

- 製品の仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社フロンティア

フクシのこトハ

フリーコール 0120-294-518

千葉本社 福祉本部 〒261-0002
千葉県千葉市美浜区新港42-4
TEL：043-301-8338

- アフターサービスのお問い合わせ

取扱店