

# 取扱説明書

## アクトモア バックサポート ウィング

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。  
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項  
や使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がありましたら、当社までお問い合わせください。

株式会社フロンティア

## 1 ご使用上の注意



### 警告

【死亡または重傷を招く可能性があるもの】

- 取り扱いが理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。  
取扱説明書に書かれた内容が理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合には、保護者、介護者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 包装用ポリ袋は、製品を取り出した後、穴を開けて廃棄してください。  
ポリ袋を誤ってかぶったりすると、窒息する危険があります。
- 定期的に圧迫を解放してください。  
このシートは効果的に局所の圧を分散しますが、長時間同一姿勢を続けると、床ずれの原因となります。
- 製品をご使用中の喫煙は、おやめください。火種の落下などにより火災ややけどの原因になります。
- 分解して口に入れたり、飲み込んだりしないでください。



### 注意

【軽傷または中程度の傷害を招く可能性があるもの】


- 常に乾燥した清潔な状態でご使用ください。  
カバー洗濯後など、カバーが十分乾燥していない状態で使用すると、カビの発生や皮膚トラブルの原因になります。  
また、お風呂などで使用しないでください。
- パッドの最適な取り付け位置および形状は、使用者の体型や姿勢によって異なります。  
取り付けの際には、当社までご相談ください。
- 車いすを使用する際の姿勢の調整や姿勢保持以外の用途には使用しないでください。
- 体に無理のかかる体位で使用しないでください。
- カバーなしでは使用しないでください。
- カバーのファスナーを開けたまま使用しないでください。クッションが破損するおそれがあります。
- 床ずれができていたり、できやすい方が使用する場合は、必ず医師や看護師、セラピスト（OT・PT）などの専門職、もしくは当社までご相談ください。
- 自動車の座席には使用しないでください。

## 2 製品の特徴

- パッドが体幹を支えて、体が横や斜めに倒れないようにサポートします。
- 体型や身体状況に合わせて、パッドの取り付け位置を調整することができます。

## 3 ご使用方法

- ①本製品のベース部をタグが下にくるように車いすの背もたれにあて固定してください。  
本製品の上下にある縦ベルトを後ろ側へ回ししっかり締めつけた後、横ベルトを車いすのバックサポートフレームに両側から巻き付け、ブレーキワイヤーに気をつけながらベルトを固定してください。(図)
- ②2つのパッドを取り付けてください。  
パッドの裏側にある面ファスナーをベース部の面に取り付けてください。パッドの位置は上下左右自在に取り付けができるため、体型や身体状況に合わせて取り付け位置を調整してください。(設置例参照)

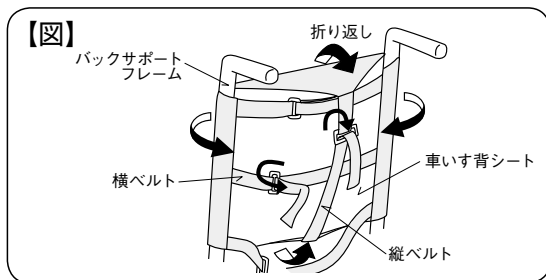

## 4 お手入れの方法

### 【ベース部】

洗濯機で洗濯が可能です。面ファスナーで生地を傷めないように洗濯ネットに入れてください。脱水後、しっかりと乾燥させてください。

### 【パッド】

- カバー…洗濯できます。水洗いをしてください。
- 中材…洗濯できません。濡れてしまった場合は、風通しの良いところで陰干しをしてください。

## 5 仕様

製品名	アクトモア バックサポート ウィング	
本体外形寸法(幅×奥行×高さ)	5.5×15×34cm	
適合車いすの座幅	37.5～56cm	
重量	約830g	
素材	カバー	ポリウレタンラミネートニット、ポリエステル
	中材	ウレタンフォーム

■製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

## 株式会社フロンティア

フクシのこトハ

フリーコール **0120-294-518**

福祉本部 〒261-0002  
千葉県千葉市美浜区新港42-4  
TEL.043-301-8338



### ●アフターサービスのお問い合わせ

取扱店