

取扱説明書

Wellstyle サーモプレート Wellstyle サーモボウル

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項や使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせください。

株式会社フロンティア

1. ご使用上の注意

警告

【死亡または重傷を招く可能性のあるもの】

- 取り扱いが理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。
取扱説明書に書かれた内容が理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合には、保護者、介護者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 食事以外の目的に使用しないでください。
- 欠けたり、ひびが入っている状態で使用しないでください。
ケガの原因となります。
- 直火や電熱調理器にかけたり、火のそばに置かないでください。
変色や変形の原因となります。


注意

【軽度または中程度の傷害を招く可能性があるもの】

- お湯や冷水を注いだあとはしっかりとキャップを閉じてください。
- 電子レンジを使用しないでください。
変形や破損の原因となります。
- タワシや研磨剤で洗わないでください。
表面に傷がつくおそれがあります。
- 必ず洗ってからご使用ください。
- 食事後は早めに洗浄し、しっかりと乾燥させてから片づけてください。
変色の原因となります。
- 高い所から落とすなど、強い衝撃を与えないでください。
破損の原因となります。
- 耐熱温度は-30度～+70度までのため、食洗機を使用する場合は設定温度に気を付けて使用ください。

2.製品の特長

- 2重構造になっており、お湯や冷水を注ぐことで温かい物は温かく、冷たい物は冷たいまま料理の温度を保持します。
- 裏面にはすべり止めがついているので、食事中に食器が動く心配がありません。

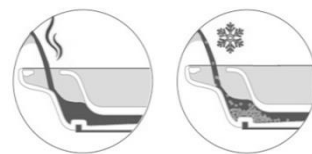

3.使用方法

- ① 本製品についているキャップの片方を取り外します。
- ② お湯または冷水を注ぎます。
- ③ キャップをしっかりと閉めて、お湯または冷水がこぼれないか確認してください。



⚠ 注意

必ず洗ってからご使用ください。

4.お手入れの方法

- 中性洗剤を使って、スポンジできれいに洗ってください。
- しっかりと水気を切って保管してください。

⚠ 注意

- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
- 金属タワシや研磨剤を使用しないでください。
- 食洗機や乾燥機は使用しないでください。

5.仕様

商品名	Wellstyle サーマプレート	Wellstyle サーマボウル
カラー	レッド、イエロー、グリーン	
サイズ（直径）	25.5cm	19cm
重 量	約410g	約225g
電子レンジの使用	不可	
食洗機／乾燥機使用	不可	
材 質	メラミン樹脂	

■製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社フロンティア

フリーコール 0120-294-518

千葉本社 福祉本部 〒261-0002
千葉県千葉市美浜区新港42-4
TEL：043-301-8338

●アフターサービスのお問い合わせ

取扱店