

取扱説明書

Wellstyle スライディングシート

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項
や使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がありましたら、当社までお問い合わせください。

株式会社フロンティア

1 ご使用上の注意

注 意

【軽傷または中程度の傷害を招く可能性があるもの】

- 取り扱いが理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。
取扱説明書に書かれた内容が理解できないと思われる方(幼児や認知症の方など)が使用する場合には、保護者、介助者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、介護を受ける方による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 包装用ポリ袋は、製品を取り出した後、穴を開けて廃棄してください。
ポリ袋を誤ってかぶったりすると、窒息する可能性があります。
- 本製品はベッドや寝具の上で、人を体位変換・移動することのみ使用してください。
- 本製品はすべりやすいので、通路・床・子どもの手の届く場所に放置しないでください。
誤って踏んだ場合、すべって転倒したりケガをするおそれがあります。
- 本製品をご使用中の喫煙はおやめください。
火種の落下などによりやけどや火災の原因となります。

2 製品の特長

- 力をかけずに、移動がラクに行えます。
- すべりのよいナイロン生地で、上下左右など様々な移動をわずかな力でラクに行えます。
- シート本体が軽くて薄いため、持ち運びにも便利です。

3 ご使用方法




差し込みかた

差し込む前の準備として、作業がしやすい環境を作りましょう。



例) 介護用電動ベッドの高さ調整機能を使い、作業しやすい高さに調整するなど

頭部から差し込み



① 三つ折りにした本製品の輪になっている部分を持ち、頭部側から枕の下から入れ、肩まで差し込みます。

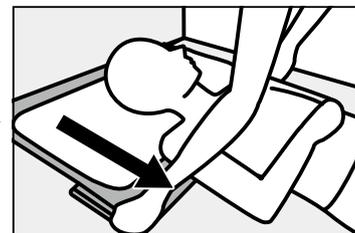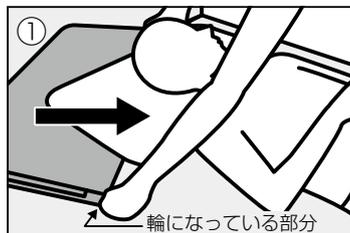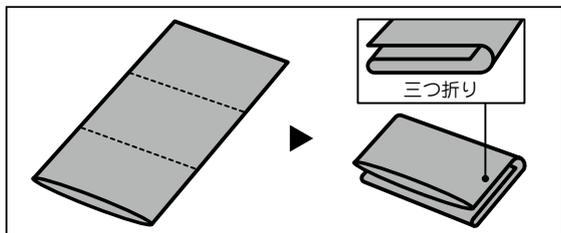

② 三つ折りにした下側(ベッド接地部A)のシートへ持ち替え、腰付近まで引き伸ばします。

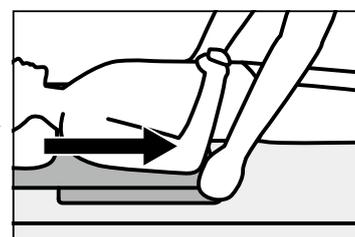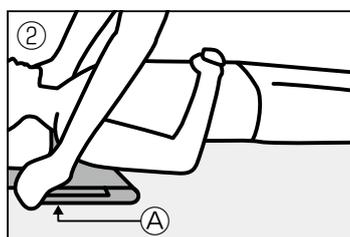


③ 最後に折りたたまれた下側(ベッド接地部B)のシートを持ち、おしりの下側まで引き伸ばします。

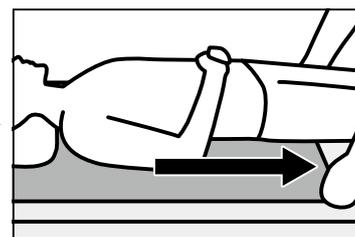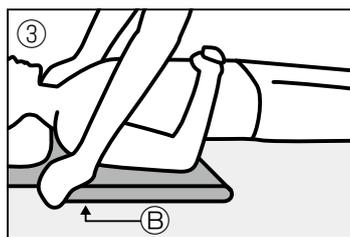


側臥位から差し込み



① シートをジャバラ状に三つ折りをして準備をします。

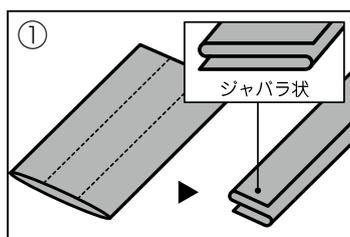

② 介護を受ける方を側臥位にして、頭からおしりまで収まる位置を確認し、シートを敷き込みます。

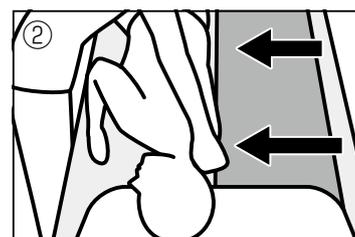

③ 側臥位から仰臥位に戻します。逆側に側臥位させて、ジャバラ状になっているシートの下側(ベッド接地面)を引き出します。

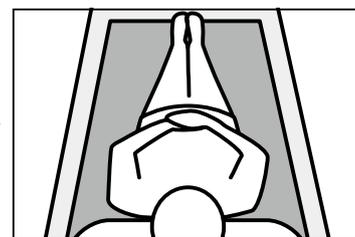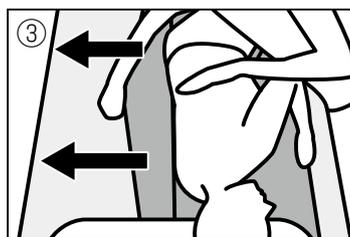



△ 注意

- 特に柔らかいマットレスやエアマットレスを使用している場合、差し込み時や移動時の負担が大きくなる場合があります。
- 介助者は、シートを敷き込んだままの状況で目を離さないでください。


体位移動のしかた

左右方向への移動

- ① 介護を受ける方または介助者の負担を軽減する準備のため、移動したい側に足と頭を少し動かします。
※拘縮など関節可動域に制限のある場合は、専門職に相談してください

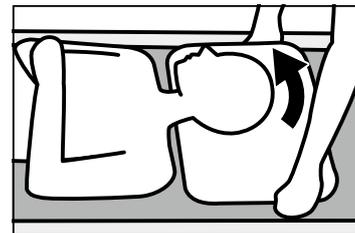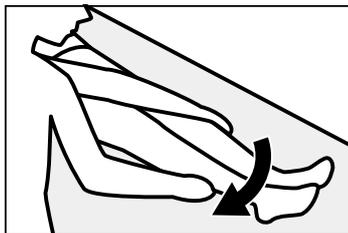

- ② 介助者は介護を受ける方の肩と骨盤付近に手を当て、移動したい側に動かします。
※状況に合わせて押す動作または引く動作を選択して行ってください
このとき、介護を受ける方が痛みを訴える場合、他の方法を検討するなど十分に配慮して行ってください。


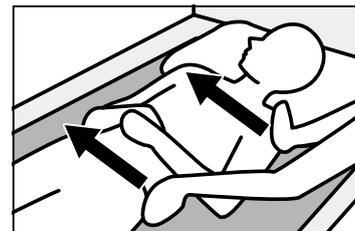


⚠ 注意

介助者の姿勢が中腰にならないように作業をしてください。
無理な姿勢で行うことで腰痛を発症するおそれがあります。

上方向への移動

- ① 介護を受ける方または介助者の負担を軽減する準備のため、シートに乗らない位置に介護を受ける方の足を立てます。
※拘縮など関節可動域に制限のある場合は、専門職に相談してください
- ② 介助者は、介護を受ける方の骨盤を支持しながら頭方向へ移動させます。

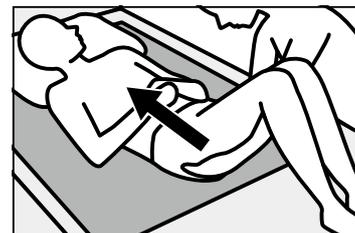
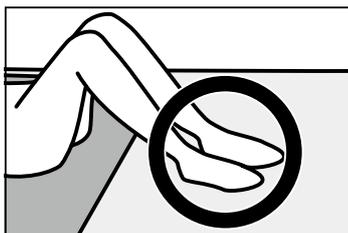


⚠ 注意


勢いよく上方向へ移動させないでください。
ベッドのボードへ頭をぶつけてケガをするおそれがあります。

引き抜きかた

- ① シートの下側をつかみ、巻き込むように頭側から腰の凹み付近へ、太もも側から腰の凹み付近へシートを集めます。

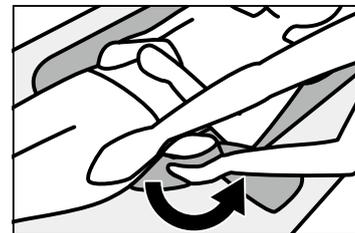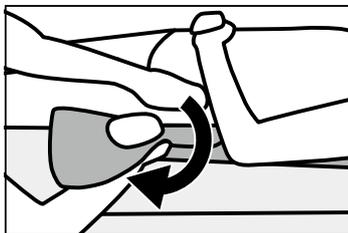

- ② 介護を受ける方の体を支えながら巻き込むようにゆっくりシートを引き抜きます。

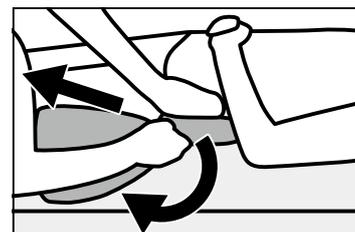

⚠ 注意

シートを引き抜くときは、力を入れて無理に引き抜かないでください。

4 お手入れの方法

中性洗剤を使用して、40度のぬるま湯にて手洗いをしてください。
その後速やかに形を整え、陰干しをしてください。

△注意

- 漂白剤や柔軟剤は使用しないでください。
- 乾燥機やアイロンは使用しないでください。
- ドライクリーニングはしないでください。



5 仕様

製品名	Wellstyle スライディングシート
本体外形寸法（幅×長さ）	70×130cm
重量	約112g
素材	ナイロン

■製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社フロンティア

フリーコール **0120-294-518**
フクシのこトハ

福祉本部 〒261-0002
千葉県千葉市美浜区新港 42-4
TEL. 043-301-8338



●アフターサービスのお問い合わせ

取扱店